



NASOPORE®

Уникальная биорассасывающаяся тампонада для носовой полости



● Материалы для ЛОР-хирургии

POLYGANICS

Bioresorbable Medical Device Solutions

NASOPORE®


Назальная тампонада нового поколения

В настоящее время доступные на рынке послеоперационные внутриносовые тампоны делятся на две категории: требующие удаления и полностью рассасывающиеся.

Несмотря на то, что нерассасывающиеся тампоны являются традиционными для использования, определенные недостатки все же существуют:

- Травматичность с последующим кровотечением после удаления
- Дискомфорт для пациента и затрудненное носовое дыхание
- Повреждение слизистой, возможен некроз вследствие сдавливания
- Возможно возникновения синдрома временной остановки дыхания во время сна
- Дисфункция слуховой трубы

Weber R.K. Laryngorhinotologie. 2009 Jun; 88(6):379-84

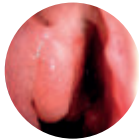

Без применения носовой тампонады возникают грануляции и рубцы




Применение NASOPORE® препятствует образованию спаек


NASOPORE®, будучи новейшей разработкой на рынке назальных тампонад, позволяет избежать недостатков, ассоциируемых с традиционными тампонами, а также предлагает дополнительные преимущества.

NASOPORE® представляет собой полностью синтетическую полиуретановую пену. Продукт доступен в нескольких моделях, различающихся по форме и длине, и может быть разрезан для придания желаемого размера и формы в зависимости от применения.

Уникальная структура продукта обеспечивает высокий уровень впитываемости (до 25 раз больше собственного веса)

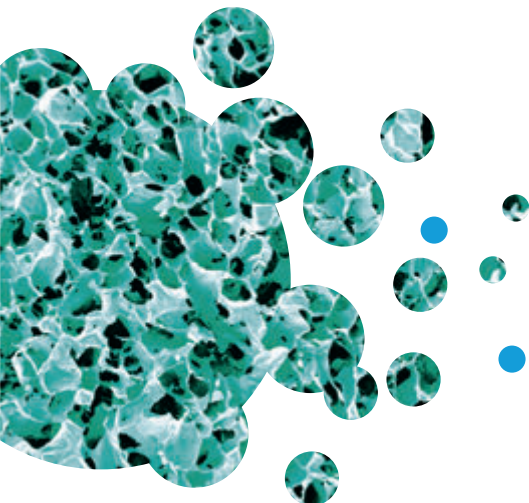

NASOPORE® обеспечивает необходимую компрессию после операции. Впитывая выделения из носа и кровь, NASOPORE® начинает постепенно рассасываться, одновременно способствуя заживлению раны. При этом он не набухает и не препятствует естественному дренажу.

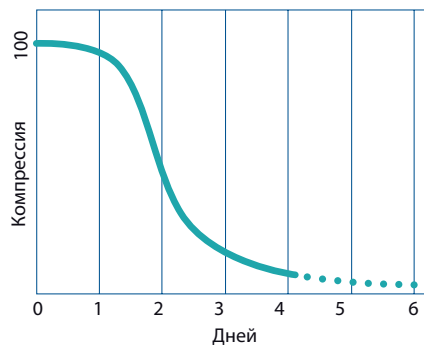

NASOPORE® полностью исчезает в течение нескольких дней, равномерно рассасываясь, безболезненно покидает полость естественным путем.

Ежедневное орошение физраствором рекомендовано в течение первой недели после операции для ускорения процесса фрагментации, а также предотвращения риска возникновения инфекции.

Доказано, что удаление традиционных тампонов связано с повреждением тканей слизистой и, соответственно, возникновением повторного кровотечения. Использование биорассасывающегося NASOPORE® позволяет избежать риска повторного кровотечения, связанного с удалением тампона.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Полиганикс.

Официальный дистрибьютор:

Основные преимущества NASOPORE®

- Полностью синтетический продукт – биологически безопасен, что доказано клиническими исследованиями
- Оказывает контролируемую щадящую компрессию в течение 36 – 48 часов после введения
- Способность к биодegradации приводит к равномерной и быстрой фрагментации
- Легок в манипуляциях для оптимального размещения в носовой полости
- Остается зафиксированным на месте после введения и не набухает
- Способствует заживлению раны особенно активно в течение критического периода
- Уникальная структура продукта обеспечивает высокий уровень впитываемости (до 25 раз больше собственного веса)
- Препятствует возникновению спаек после операции на околоносовых пазухах. Может быть использован для срединной носовой раковины и носовой перегородки.
- Предотвращает латерализацию носовых раковин
- Избавляет от необходимости послеоперационного удаления.
- Атравматичный, обеспечивает комфорт для пациента
- На данный момент проводятся клинические исследования по оценке использования NASOPORE® как средства «доставки» лекарств.

Описание продукта NASOPORE®

Артикул	Тип	Размер
ND01/025-04B	Standard	4 cm
ND01/025-08B	Standard	8 cm
ND02/025-04B	Forte	4 cm
ND02/025-08B	Forte	8 cm
ND05/025-04B	Forte Plus	4 cm
ND05/025-08B	Forte Plus	8 cm



Все продукты NASOPORE® доступны в коробках по 8 тампонов.

Условия хранения Nasopore®: продукт нужно хранить при температуре не выше 4 °С. Срок годности Nasopore® составляет 24 месяца.

Тампоны Nasopore®, находящиеся в полости носа, рекомендуется увлажнять дважды в день.

POLYGANICS

Bioresorbable Medical Device Solutions

Полиганикс – Нидерланды, г. Гронинген, Розенбурглан, 15А
Тел. 31 (0)50 588 65 88 – Факс. +31 (0)50 588 65 99 - sales@polyganics.com - www.polyganics.com

Информация, предоставленная в данной брошюре направлена на то, чтобы дать общее представление о продукте. Перед использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, указанной на упаковке и/или инструкцией по его применению на вкладыше.